

# Trächtigkeitstest für alle Equiden



Vorbei ist die Zeit des Wartens und der Ungewissheit ob ihr Pferd, Pony, Esel oder Zebra tragend ist. Testen Sie selbst einfach und schnell!

Mit **Wee-Foal 38** vom Tag 38 bis zum 110ten Tag, oder mit dem

**Wee Foal 110** vom 110ten Tag bis Tag 300 nach der Bedeckung.

## Ihre Vorteile

- **Wee-Foal** ist präzise, einfach, schnell und zuverlässig, innerhalb weniger Minuten (5-20 Min.) haben Sie Klarheit ob Ihre Stute tragend ist.
- 
- **Wee-Foal** ist nicht gesundheitsschädigend für Ihre Stute und ihr ungeborenes Fohlen. Keine Beeinflussung am Tier.
- 
- **Wee-Foal** ist geeignet für alle Equiden, wie z.B. auch Esel, Zebras, usw. Sehr zu empfehlen für kleine Pferde wie Shetlandponys, Miniatur Pferde, oder Zwergesel wo Ultraschalluntersuchungen nicht in Frage kommen oder die Stute sogar verletzen könnten.
- 
- **Wee-Foal** ist eine sinnvolle Ergänzung um die Entwicklung der Trächtigkeit im Auge zu behalten, ersetzt die Gesundheitsuntersuchungen durch Ihren Tierarzt jedoch nicht.
- 

**Wee-Foal** ist ein bedienungsfreundlicher, schnell auszuführender Urintest für alle Equiden. Optimal bei kleinen Rassen oder Equiden, die nicht per Ultraschall untersucht oder abgetastet werden können

Falls Sie daran zweifeln, ob Ihre Stute noch tragend ist, kann Ihnen dieser Test Klarheit verschaffen, ohne Ihren Tierarzt einzuschalten.

# Wee Foal 38 / Wee Foal 110



## Wie funktioniert Wee-Foal 38/110?

Wee-Foal 38 testet zwischen Tag 38 bis Tag 110 ob das Hormon PMSG (eCG) im Urin der Stute vorhanden ist, da dieses Hormon in der Gebärmutter der Stute bei einer Trächtigkeit produziert wird. Der Wee Foal 110 Test wird vom Tag 110 bis Tag 300 nach der Bedeckung eingesetzt.

## Wie wird Wee-Foal 38 angewendet?

Dieser Test erfordert nur 2-3 Tropfen der Stutenurinprobe, die mittels der beigegefügt Pipette in die Einbuchtung der Testkassette geträufelt wird. Schon nach 5-10 Minuten Wartezeit, wird das Ergebnis sichtbar.

## Wie wird Wee Foal 110 angewendet?

Beim Test **Wee Foal 110** wird die gesammelte Stutenurinprobe mit dem mitgelieferten Urinverdünner vermischt und anschließend mittels einer zweiten im Test enthaltenen Pipette in die Einbuchtung der Kassette geträufelt. Auch hier wird das Ergebnis nach 5 bis 10 Minuten Wartezeit sichtbar.

Am besten halten sich diese Test Kits, wenn die geschlossene Verpackung im Kühlschrank aufbewahrt wird. Für ein optimales Test-Ergebnis ist frisch gesammelter Urin von größter Wichtigkeit. Der frisch gesammelte Urin kann jedoch maximal 4 Stunden im Kühlschrank bis zum Gebrauch aufbewahrt werden. Beide Test Kits sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert. Um das beste Testergebnis zu erzielen, sollten Sie darauf achten, dass sowohl die Test Kits als auch der Urin, Zimmertemperatur haben.

## Inhalt eines Wee Foal 38 Test Kit:

- 1 Testkassette
- 1 Pipette, als Set verschweißt in Plastikfolie
- Eine ausführliche Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache

## Inhalt eines Wee Foal 110 Test Kit:

- 1 Testkassette
- 2 Pipetten
- 1 Fläschchen Urinverdünner, als Set verschweißt in Plastikfolie
- Eine ausführliche Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache



## Urin sammeln

Es kann durch aus etwas Zeit in Anspruch nehmen, eine Urinprobe zu sammeln, da Pferde relativ selten urinieren (ca. alle 6 Stunden).

Hier einige Tipps wie Sie schnell zum Ergebnis kommen:

### **Verschiedene Ratschläge:**

Viele Pferde urinieren sobald man sie in eine frisch eingestreute Box/Stall stellt

Oft haben Pferde feste Angewohnheiten wie: urinieren nach getaner Arbeit

Es gibt Pferde die, wenn der Besitzer pfeift, urinieren (kann trainiert werden).

Gute Ergebnisse erhalten Sie auch wenn sie einen Schwamm, Monatsbinde oder Ähnliches unter der Scheide befestigen.

Trägt Ihr Pferd eine Decke, könnte man beispielsweise daran einen Plastikbehälter befestigen.

Selbst mit einem Schwamm oder Papiertaschentuch, kann Urin vom Boden aufgenommen werden.

(stellen Sie dabei sicher, dass der Urin nicht mit dem anderer Stuten vermischt ist)

## Preise und Versand



### Wee-Foal 38

- 1 Test €27,00
- 2 Tests €52,00
- 3 Tests €77,00

### Wee Foal 110

- 1 Test €25,00
- 2 Tests €48,00
- 3 Tests €71,00

größere Mengen auf Anfrage.

Alle Preise inkl. MwSt.  
Versand innerhalb Deutschlands immer kostenlos.

Vertrieb Deutschland:  Human- und Veterinärmedizintechnik GmbH